

Медицинский центр Управления делами Президента Российской Федерации  
**ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

---

ОТЗЫВ

об использовании гемоглобинометра МиниГЕМ-540  
производства НПП "Техномедика".

Гемоглобинометр МиниГЕМ-540 эксплуатируется в гематологическом отделении Центральной клинико-диагностической лаборатории с января 1995 года по сентябрь 1998 года.

Прибор используется для контрольных (повторных) измерений концентрации гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом при патологиях, выявленных во время исследования крови на автоматических гематологических анализаторах, а также для единичных исследований в режиме работы экспресс-лаборатории, в полевых условиях, при выездах лаборанта на дом. Ежедневно на гемоглобинометре проводится по 10-25 измерений, но он вполне пригоден и для серийных исследований.

МиниГЕМ-540 обладает высокой точностью и коротким временем измерения. Процесс измерения длится менее секунды. Важно и удобно то, что результат измерения представляется на табло в единицах концентрации гемоглобина. Прибор прост и надежен в работе. Он имеет миниатюрные размеры и может быть размещен в любом удобном месте лаборатории. При использовании гемоглобинометра не требуются регулировки и калибровки растворами гемиглобинцианида. Контроль работоспособности гемоглобинометра производится стеклянным оптическим стандартом.

Замечаний к работе прибора за время эксплуатации нет.

Высокая точность и стабильность измерений, а также удобство в эксплуатации, позволяют рекомендовать гемоглобинометр МиниГЕМ-540 для широкого применения в медицинской практике.

Заведующая ЦКДЛ



Стороженко Л.Г.

Заведующая гематологическим  
отделением ЦКДЛ



Безрукова Н.Л.